

EINRICHTUNG DER VDDS-SCHNITTSTELLE ZU ARCUS DIGMA / WINJAW

Version: 1.1



Allgemein

- Die VDDS-Schnittstelle übergibt nur die Patienten an das Programm Arcus Digma bzw. WinJaw.
- Bevor die Schnittstelle aktiviert werden kann ist das Programm Arcus Digma bzw. WinJaw einmal zu starten!

Einstellungen im DS-Win


DS-Win starten → Einstellungen → Sonstige Einstellungen → VDDS auswählen

The screenshot shows the 'Schnittstellen-Einrichtung' dialog box with the 'VDDS-Schnittstelle' tab selected. The 'Dampsoft-Befundsschnittstelle' tab is also visible. The 'VDDS-Multimedia-Schnittstelle aktivieren' checkbox is checked. Below this, there are two columns of text: 'Bitte markieren Sie die Schnittstellen, welche eine Schaltfläche in den Kartei- karten der Patienten erhalten sollen.' and 'Bitte markieren Sie die Schnittstellen, von denen DS-WIN-PLUS Bilder anfordern soll:'. The left column contains a list with 'KAVO Arcus Digma' selected. The right column is empty. Below the list, there are several options: 'Schaltflächentext:' with an empty text box, 'auf Ready-Flag warten' (unchecked), 'auf Programmbeendigung warten' (unchecked), 'Modulfenster anzeigen' (unchecked) with a sub-option 'Beim Aufruf von DS-VIEW' (unchecked), 'Timeout: 30000 ms' (spin box), 'Bilder als Hintergrundprozess suchen' (checked) with a sub-option 'Beim Aufruf der Karteikarte' (unchecked), and 'Bilder für jede Praxis einzeln anfordern' (unchecked). At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Rückgängig', and 'Übernehmen'.

Im Reiter VDDS-Schnittstelle das Schaltfeld „VDDS-Multimedia-Schnittstelle aktivieren“ setzen. Anschließend im linken Fenster „KAVO Arcus Digma“ bzw. „WinJaw“ auswählen. Mit Übernehmen und OK den Dialog verlassen.

Funktion der Schnittstelle

Das DS-Win übergibt über die VDDS-Schnittstelle den Patienten an Arcus Digma bzw. WinJaw. Ist der Patient noch nicht im Programm Arcus Digma bzw. WinJaw vorhanden erscheint folgende Meldung:

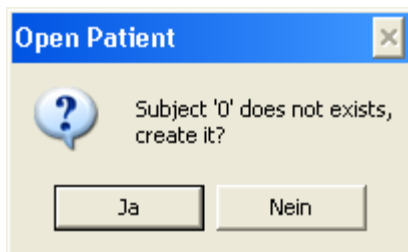

Wird dieser Dialog mit „Ja“ bestätigt, so wird der Patient an das Programm Arcus Digma bzw. WinJaw übergeben.

Die Übernahme des Patienten im Programm Arcus Digma bzw. WinJaw erfolgt automatisch.

Alle Angaben nach dem derzeitigen Stand der Technik und bestem Wissen. Irrtum vorbehalten!

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMP SOFT
Die Zahnarzt-Software