

# SCHNITTSTELLEN- BESCHREIBUNG PAROBYZZ- BEFUNDSCHNITTSTELLE

Version: 1.1



## Voraussetzung:


Die Konfiguration des Parobyzz und der PA-Sonde von Orange Dental ist gemäß den Herstellerangaben durchzuführen.

Im **DS-Win** muss unter

„Einstellungen“ → „Sonstige Einstellungen“ → „Externe Programme“, ...





... der Button für „PA-Sonde“ mit einem Klick auf „Eigene Schaltfläche“ aktiviert werden (Das „N“ ändert sich dann in ein „J“)

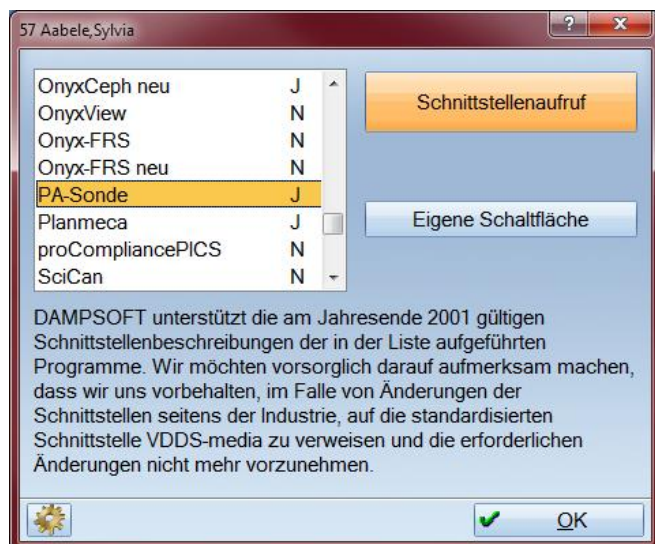

## Wichtiger Hinweis:

Der Button „PA-Sonde“, der nun z.B. im Reiter PatInfo zu finden ist, hat keine Funktion. Er sorgt ausschließlich dafür, dass im DS-Win-PA-Modul unter PA-Sonde die Import-Schaltfläche angezeigt wird.

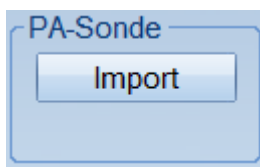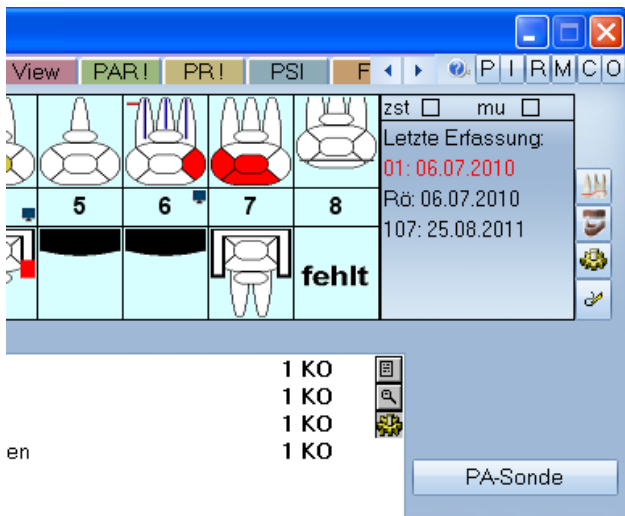

## Funktion der Schnittstelle:


### Parobyzz:

Nachdem nun **im Parobyzz** der Patient aufgenommen und der Befund durchgeführt wurde, kann dieser mit einem Klick auf **„Export“** als Datei gespeichert werden



### DS-Win:

Die Export-Datei des Parobyzz kann nun **im DS-Win-PA-Modul** im Bereich **„PA-Sonde“** importiert werden

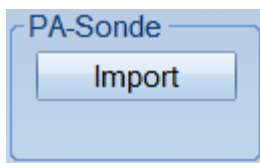

## Wichtiger Hinweis:

Es wird immer der zuletzt exportierte Befund aus dem Parobyzz ins DS-Win importiert. Es ist also wichtig darauf zu achten, dass man immer erst im Parobyzz den Befund des gewünschten Patienten exportiert und anschließend im DS-Win bei dem gleichen Patienten importiert. Ansonsten würde der Befund einem falschen Patienten zugeordnet.

**DAMPSOFT GmbH**  
Vogelsang 1  
24351 Damp

T 04352 9171-16  
F 04352 9171-90  
info@dampsoft.de  
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.  
Seit 1986.**



**DAMPSOFT**  
Die Zahnarzt-Software