

VERWENDUNG DER PERI PROBE COMP

Version: 1.1





Aktivieren der Messsonde:

Die Messsonde wird aktiviert, indem im PA-Fenster der Schalter Voreinstellungen angewählt wird. Im Dialog für die Voreinstellungen muss dann der serielle Port (COM1,COM2,...), an dem die Messsonde angeschlossen ist, angegeben werden.

Kalibrieren der Messsonde:

Zum Kalibrieren klicken sie mit der Maus auf eine beliebige Taschentiefenmessfläche im PA-Formular. Wenn das Zahleneingabefenster erscheint, halten sie Knopf 1 der Messsonde solange gedrückt, bis in der Mitte des Bildschirms die Aufforderung "Messen Sie jetzt 2 mm" erscheint. Nehmen sie das Kalibrierungsstück und messen sie die kleine Kante, indem sie die Messsonde entsprechend ansetzen und dann Knopf 2 drücken. Wurde die Messung korrekt durchgeführt, werden sie aufgefordert 10 mm (die lange Kante) zu messen. Abschliessend werden sie gefragt, ob die Messung gespeichert werden soll.

Messen mit der Messsonde

Klicken sie mit der Maus die erste zu messende Fläche im PA-Formular an. Wenn das Zahleneingabefenster erscheint, messen sie die gewählte Fläche beim Patienten und drücken dann den Knopf 2. Die Taschentiefe wird in das PA-Formular eingetragen und die nächste zu messende Fläche automatisch berechnet. Mit kurzem Druck auf Knopf 1 wird auf die nächste Fläche gesprungen ohne zu messen.

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMP SOFT
Die Zahnarzt-Software