

EINBINDUNG SIEGELGERÄT

Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.



DAMPSOFT
Die Zahnarzt-Software


1.1. Anbinden des Siegelgerätes

Um Ihr Siegelgerät anzubinden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können Ihr Siegelgerät über SD-Karte/Netzwerkpfad anbinden oder über Netzwerk (UDP-Port). Das Gerät ist gemäß der Herstelleranleitung zu installieren. Sollten Sie Fragen zur Installation auf Ihrem Rechner oder Fragen zum Gerät selbst haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder an den Gerätehersteller. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Dampsoft-Mitarbeiter keine Installationen an den Kunden-Rechnern durchführen, da weder die Rechner-Eigenschaften noch eventuell vergebene Passwörter bekannt sind.


1.1.1. Anlegen eines Siegelgerätes

Das Einbinden der Siegelgeräte ist über zwei Produkterweiterungen möglich. DS-Win-MPG und DS-Win-BuS. Diese Beschreibung zeigt das Einbinden beispielhaft für das DS-Win-BuS.

Über den Menüpunkt „Erweiterungen“ gelangen Sie in die Erweiterung „BuS“

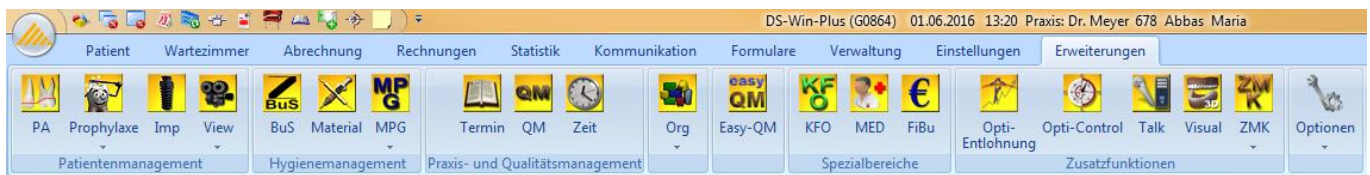


Im geöffneten Dialog der BuS-Erweiterung klicken Sie bitte auf die Karteikarte „Verwaltung“ und dann weiter auf „Siegelgeräte“.

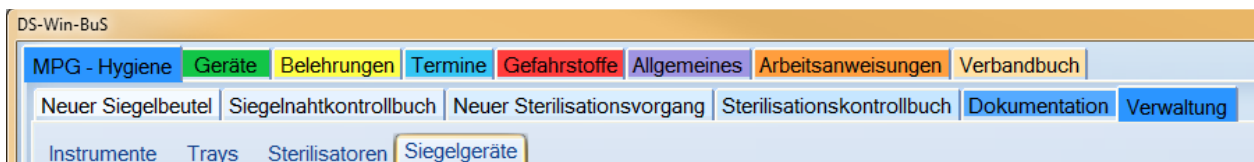

Sollte noch kein Siegelgerät aufgenommen sein, können Sie sofort im Feld „Name“ das neue Siegelgerät benennen. Andernfalls klicken Sie bitte erst auf den Button „Neu“.

Definieren Sie, ob dieses Siegelgerät Ihr „Standard-Siegelgerät“ sein und mit welcher Chargennummer der nächste Siegelvorgang beginnen soll. Dies muss mit der nächsten Chargennummer des Siegelgerätes übereinstimmen. Die Chargennummer finden Sie in den Einstellungen Ihres Siegelgerätes. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Herstelleranleitung oder setzen sich mit Ihrem Systembetreuer oder Gerätehersteller in Verbindung. Setzen Sie den Haken bei „Standard-Siegelgerät“, wird dieses Siegelgerät standardmäßig vorausgewählt. Dies ist nur relevant, wenn mehrere Siegelgeräte in der Praxis genutzt werden.

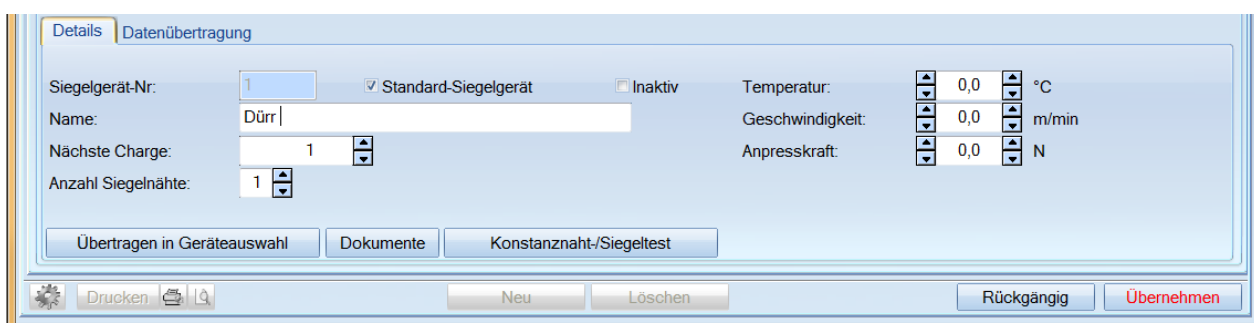

Klicken Sie nun rechts auf „Übernehmen“, um mit der weiteren Einrichtung fortzufahren.

In der Registerkarte „Datenübertragung“ stellen Sie ein, wie die Daten aus dem Siegelgerät ausgelesen werden. Das Auslesen kann über folgende Wege geschehen:


- Netzwerkpfad (Ordner innerhalb des Netzwerkes auf einem erreichbaren Rechner)
- SD-Karte (über einen Kartenleser)
- Netzwerk/UDP-Port (Anschluss über Netzkabel)

Bitte lassen Sie sich hierfür von Ihrem Systembetreuer oder Gerätehersteller ausführlich beraten.


1.2. Einbindung über SD-Karte/Netzwerkpfad

Die Daten werden entweder mittels Netzwerkpfad oder Speicherkarte übertragen.

Im DS-Win-BUS wählen Sie die Datenübertragung „SD-Karte/Netzwerkpfad“ aus.

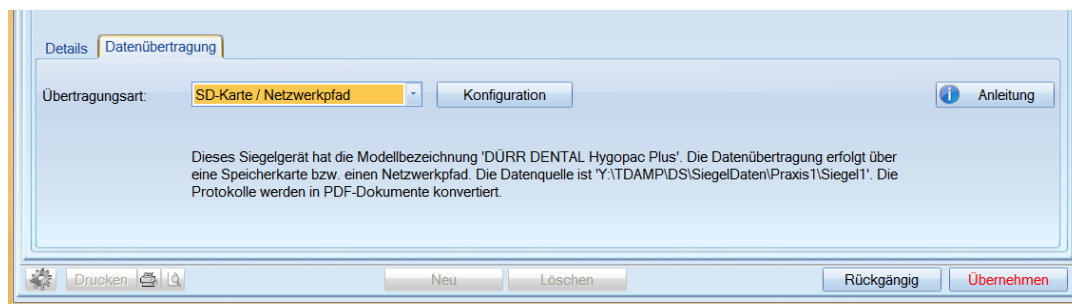


Klicken Sie auf „Konfiguration“.

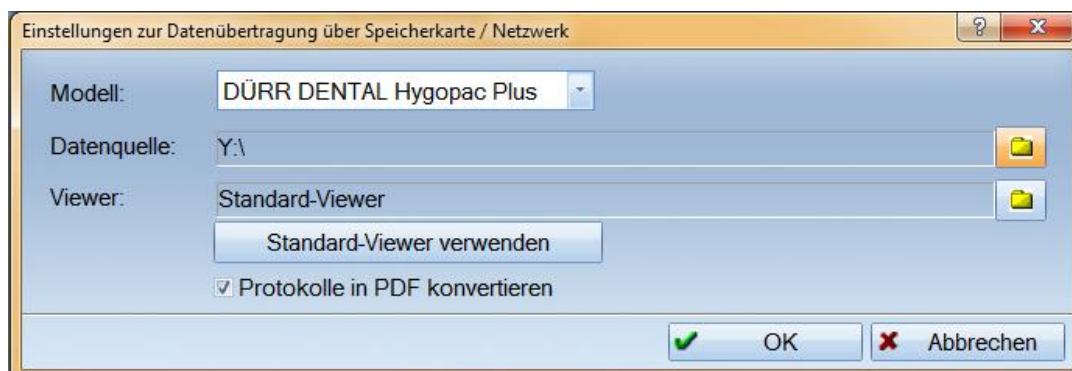


- Im Feld „Modell“ wählen Sie Ihr Siegelgerät aus.
- Im Feld „Datenquelle“ stellen Sie den Ordner oder den Datenträger ein, in dem die Protokolle vom Siegelgerät abgelegt wurden.
- Als Standard ist die Konvertierung in PDF aktiviert. Als „Viewer“ ist der in Windows definierte Standard-Viewer voreingestellt. Zum Anschauen der Protokolle benötigen Sie den Acrobat Reader. Wenn Sie einen zusätzlichen Viewer installiert haben sollten, können Sie diesen hier einstellen.
- Speichern Sie die Einstellungen durch einen Mausklick auf „OK“ ab.

1.3. Einbinden über „Netzwerk (UDP-Port)“

Hierzu verbinden Sie Ihren Rechner mit dem Netzwerkkabel. Wählen Sie im Feld „Übertragungsart“ den Punkt „Netzwerkpfad (UDP-Port)“ aus.

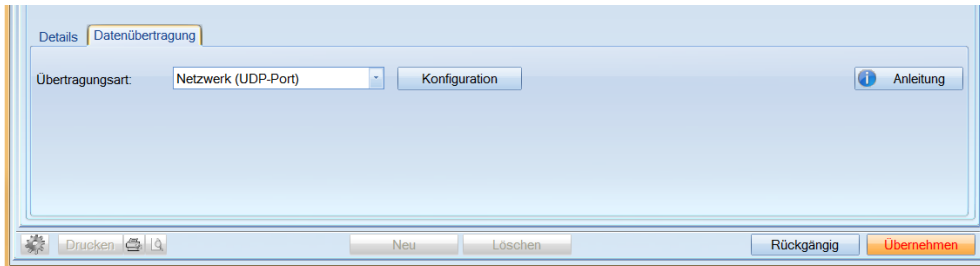

Klicken Sie auf „Konfiguration“.

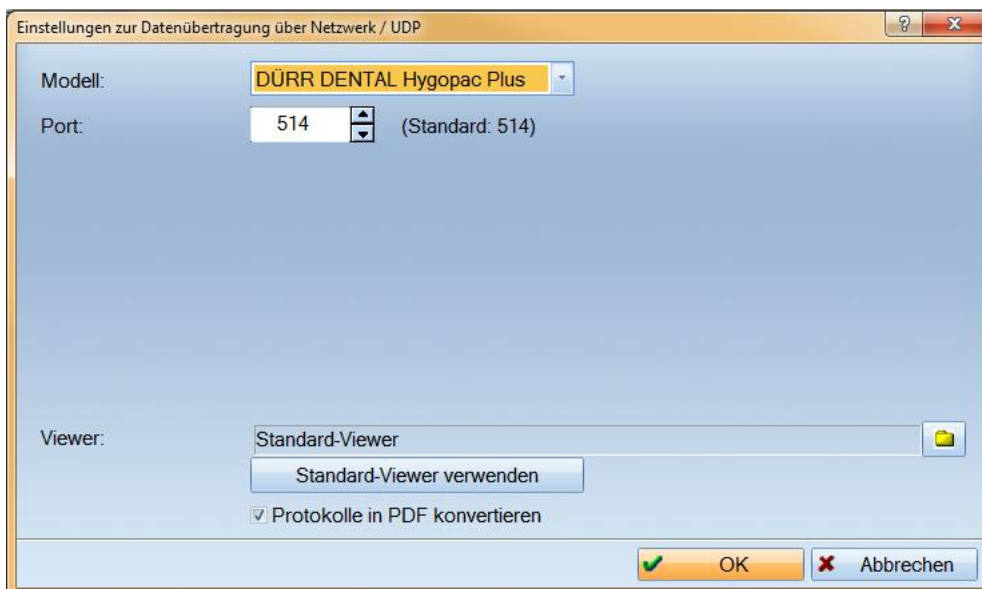

- Im Feld „Modell“ wählen Sie Ihr Siegelgerät aus.
- Im Feld „Port“ geben Sie bitte den vom Siegelgerät eingestellten Wert ein. Der Port wird Ihnen in den Einstellungen des Siegelgerätes angegeben. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Herstelleranleitung oder setzen sich mit Ihrem Systembetreuer oder Gerätehersteller in Verbindung.
- Als Standard ist die Konvertierung in PDF aktiviert. Als „Viewer“ ist der im Windows definierte Standard-Viewer voreingestellt. Zum Anschauen der Protokolle benötigen Sie den Acrobat Reader. Wenn Sie einen zusätzlichen Viewer installiert haben sollten, können Sie diesen hier einstellen.
- Bei der Anbindung über „Netzwerk UDP-Port“ läuft im Hintergrund die dssiegel.exe, die vom Systembetreuer in die Virenschoner-Prozessausschlüsse einzutragen ist. Für den im Siegelgerät eingestellten UDP-Port ist in der Firewall erforderlichenfalls eine Regel einzutragen.
- Bei mehr als einem Siegelgerät im gleichen Netzwerk muss bei der Geräteinstallation jedes Gerät auf eine eigene IP-Adresse und einen eigenen UDP-Port konfiguriert werden.
- Die IP-Adresse wird automatisch über die Abfrage des UDP-Ports aus der Antwort des Gerätes ermittelt.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Dampsoft keine Fragen zum Siegelgerät beantworten kann. Sollten Sie Fragen zum Siegelgerät haben, wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller oder Lieferanten.

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.



DAMP SOFT
Die Zahnarzt-Software